

RESPIRÁTOR AJ-01

TŘÍDA OCHRANY
FFP2

- MAXIMÁLNĚ PRODYŠNÝ
- ERGONOMICKY TVAROVANÝ
- HYPOALERGENNÍ

Návod k použití:



1. Respirátor rozevřete a vytvarujte dle obličeje.
2. Přiložte respirátor k obličeji.
3. Nasadte upínací pásky za uši.
4. Vytvarujte modelační pásek kolem nosu.
5. Zkontrolujte těsnost respirátoru po celém obvodu (u osob s vousy může docházet k netěsnosti).

UPOZORNĚNÍ:

- Před použitím se seznamte s návodem k použití.
- Před i po použití respirátoru si důkladně umyjte, příp. dezinfikujte ruce!
- Respirátor je určen pro jednorázové použití. Po použití jej proto vyhoďte.
- Respirátor nepoužívejte déle než 8 hodin nebo jednu směnu.
- V případě dýchacích nebo jiných zdravotních problémů, respirátor sejměte a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Doba uskladnění : 3 roky. Skladujte v suchu a teplotě mezi -10°C a 30°C
- Neuchovávejte na přímém světle a nevystavujte slunečnímu záření.



0598

EN149:2001+A1:2009

TŘÍDA OCHRANY: FFP2 NR